

2019 年 12 月

お客様各位

ベックマン・コールター株式会社  
ダイアグノスティックス営業本部  
ヘマトロジー統括部

**Ac・T シリーズ、HmX、LH 500**

**長期間使用しない場合（年末年始、ゴールデンウィークなど）の対処について**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、装置を長期間使用しない場合の対処について、下記のとおりご案内させていただきます。  
ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先へご連絡いただきますようお願いいたします。

敬具

記

**(1) 休日前ルーチン作業終了後の手順**

・ シャットダウンおよびスタートアップ実施

シャットダウンを実施する。30 分程度クリーナーが装置内に充填された状態にする。

その後、必ずスタートアップを実施してください。

注1) シャットダウンの状態では装置本体の電源をオフにした場合、プライムが入らず内部チューブが詰まる可能性があります。

注2) 各試薬が十分量あること、廃液タンクが空であることを確認してください。

**(2) 休日明けルーチン作業前の手順**

1) シャットダウン実施

2) スタートアップ実施

休日明けはバックグラウンドが外れる可能性があります。外れた場合、再度スタートアップを実施してください。

3) DIFF データが出なかった場合の対処（HmX、LH 500）

DIFF 試薬のプライムを実施する:ダイリ्यूター機能>試薬プライミング>バック を実施

**(3) その他、注意事項**

- ・ 休日中に測定する場合は、通常の週始めと同様の手順を行ってください。
- ・ 休日中に測定後は、貴施設の運用に合わせて、シャットダウン、スタートアップを実施してください。

以上

お問い合わせ先	ベックマン・コールター株式会社 お客様サポートセンター 電話 0120-566-730 または 03-6745-4704 FAX 03-5530-8645 電話受付時間 9:00～17:30(土・日・祝日・その他休業日を除く)
---------	--